


# Attends® For Men




## Anlegehinweise Attends For Men

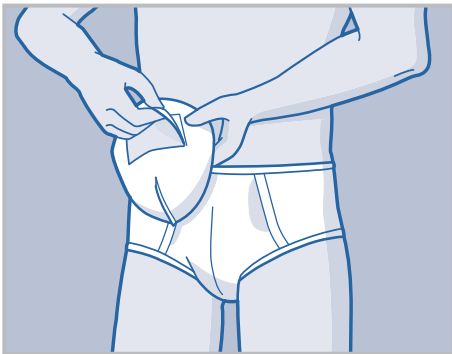

**1** Falten Sie die Einlage auf und ziehen Sie sie längs in eine Schiffchenform. Entfernen Sie den Abziehstreifen auf der Rückseite.



**2** Halten Sie den breiteren Teil nach oben und den schmalen Teil nach unten.

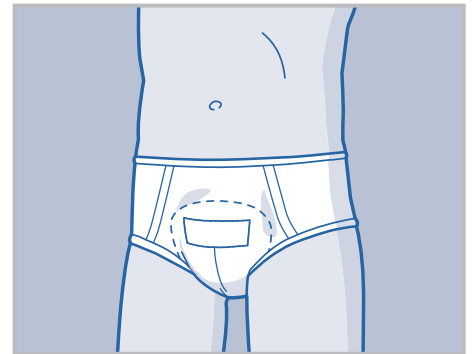

**3** Legen Sie die Einlage mit dem schmalen Ende nach hinten in die Unterwäsche ein. Der Klebestreifen berührt dabei die Unterwäsche und niemals die Haut.

## Hinweise und Tipps

### Produktauswahl

- Wählen Sie die richtige Saugstärke aus.
- Verwenden Sie die Attends For Men Einlage mit eng anliegender Unterwäsche.
- Bitte keine weiten Unterhosen (Boxershorts) verwenden.

### Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.