


Attends® Flex



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Flex ist ein Sortiment von saugfähigen Vorlagen mit Hüftgürtel, die für starke Inkontinenz entwickelt wurden.

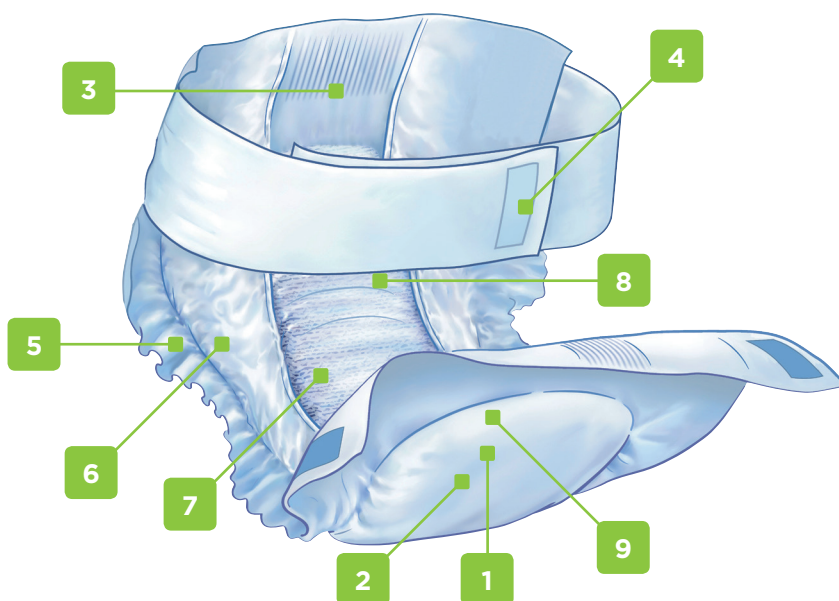

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Weiße luftdurchlässige Außenseite für mehr Tragekomfort, Diskretion und Hautgesundheit.</p> | <p>2 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschwimmen an, wann das Produkt gewechselt werden muss.</p> | <p>3 Mit elastischem Hüftgürtel für optimale Passform und Auslaufschutz.</p> |
| <p>4 Dank des flexiblen Verschluss-Systems kann zuerst der Hüftgürtel passgenau angelegt werden, bevor die aufsaugende Einlage daran befestigt wird.</p> | <p>5 Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz.</p> | <p>6 Auslaufsperrern sorgen für bestmöglichen Auslaufschutz.</p> |
| <p>7 Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.</p> | <p>8 Leistungsfähiger Saugkern sorgt für Auslaufschutz, Geruchsbindung und ein trockenes Tragegefühl.</p> | <p>9 Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt.</p> |

Weitere Informationen unter:
www.attends.at www.attends.ch

Saugstärke / Größe

Saugstärke / Größe		Stück / Beutel Stück / Karton	EAN 7332152 Packung / Karton	Bauch- / Hüftumfang in cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Elastische Seitenbündchen	Auslaufsperrn	Wiederverschließbares Fixiersystem	Geruchsbindung (Natural Odour Protection)	Atmungsaktiv	Quick-Dry Technologie
8	Attends Flex Small 	28 4x28	206713 206720	60 - 85	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Medium 	28 4x28	206775 206782	75 - 105	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Large 	28 4x28	206836 206843	85 - 125	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Extra Large 	26 4x26	206898 206904	100 - 155	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Attends Flex Small* 	26 4x26	206737 206744	60 - 85	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Medium 	26 4x26	206799 206805	75 - 105	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Large 	26 4x26	206850 206867	85 - 125	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Extra Large* 	22 4x22	206911 206928	100 - 155	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Attends Flex Small 	22 4x22	206751 206768	60 - 85	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Medium 	22 4x22	206812 206829	75 - 105	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Large 	22 2x22	206874 208007	85 - 125	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Flex Extra Large 	20 4x20	206935 206942	100 - 155	Vlieschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



Aktivzone

Die Aktivzone im Schrittbereich des Produktes sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Gesunderhaltung der Haut und hervorragenden Auslaufschutz.



Geruchsbindung

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



Hautfreundlicher pH-Wert

Die Saugkern-Technologie mit Aktivfasern in der Aufnahmeschicht sorgt für einen natürlichen, hautfreundlichen pH-Wert von ca. 4,5. Dies hilft, die Haut zu schützen und sie gesund zu erhalten.



Atmungsaktiv

Atmungsaktives Material lässt die Luft zirkulieren, was zur Gesunderhaltung der Haut beiträgt.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Flex ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.